

CARA PAKAI

JC-014 NEO KNEE HELPER



KETERANGAN

1. Bentangkan dan masukkan alat melalui telapak kaki
2. Pastikan logo NEOMED menghadap ke depan dan posisinya berada di atas
3. Tarik hingga mencapai bagian lutut
4. Lihat hasil setelah pemakaian

CARA PAKAI

JC-050 NEO SMART KNEE SUPPORT



KETERANGAN

1. Bentangkan dan masukkan alat melalui telapak kaki
2. Pastikan logo NEOMED menghadap ke depan dan posisinya berada di atas
3. Tarik hingga mencapai bagian pusat lutut

CARA PAKAI

JC-7530 NEO ANKLE STRONG



KETERANGAN

1. Letakkan tumit kaki pada lubang yang terdapat pada alat
2. Rekatkan sayap bagian atas maupun sayap bagian bawah
3. Letakkan sabuk pada bagian telapak kaki (posisi sabuk dekat dengan tumit)
4. Rekatkan sabuk secara menyilang sesuai dengan tingkat tekanan yang dibutuhkan

CARA PAKAI

JC-015 NEO ANKLE HELPER



KETERANGAN

1. Bentangkan alat
2. Masukkan alat dengan meletakkan tumit pada lubang. Pastikan logo NEOMED menghadap ke depan dan posisi berdiri di atas
3. Silangkan sabuk dari bagian telapak kaki hingga ke bagian pergelangan kaki sampai membentuk huruf "X"
4. Silangkan sisi lainnya sesuai dengan instruksi nomor 3
5. Lihat hasil setelah pemakaian

CARA PAKAI

JC-051 NEO SMART ANKLE SUPPORT



KETERANGAN

1. Bentangkan dan masukkan alat melalui telapak kaki
2. Pastikan logo NEOMED menghadap ke depan dan posisinya berada di atas
3. Tarik hingga mencapai bagian pusat lutut

CARA PAKAI

JC-7510 NEO ELBOW STRONG



KETERANGAN

1. Masukkan tangan melalui bagian rongga kain dan pastikan posisi siku berada pada lubang pada alat
2. Pegang ujung sayap bagian atas
3. Kemudian rekatkan sayap bagian atas dan pastikan logo NEOMED berada pada bagian atas
4. Selanjutnya rekatkan sayap bagian bawah
5. Pengguna dapat mengatur tingkat tekanan pada alat sesuai kebutuhan

CARA PAKAI

JC-016 NEO ELBOW HELPER



KETERANGAN

1. Bentangkan alat
2. Masukkan alat melalui telapak tangan. Pastikan logo NEOMED menghadap ke depan dan posisi berdiri di atas
3. Tarik alat hingga ke siku bagian tengah
4. Lihat hasil setelah pemakaian

CARA PAKAI

JC-052 NEO SMART ELBOW SUPPORT



KETERANGAN

1. Bentangkan alat
2. Masukkan alat melalui telapak tangan. Pastikan logo NEOMED menghadap ke depan dan posisi berdiri di atas
3. Tarik alat hingga ke siku bagian tengah

CARA PAKAI

JC-7520 NEO WRIST STRONG



KETERANGAN

1. Masukkan alat hingga ke bagian pergelangan melalui bagian rongga kain
2. Pegang ujung sayap
3. Kemudian rekatkan secara melingkar sesuai kebutuhan
4. Masukkan sabuk kedalam ring plastik
5. Rekatkan sabuk secara melingkar sesuai kebutuhan
6. Sabuk boleh tidak dipasang jika di inginkan oleh pengguna

CARA PAKAI

JC-017 NEO WRIST HELPER



KETERANGAN

1. Bentangkan alat
2. Masukkan alat melalui telapak tangan. Pastikan logo NEOMED menghadap ke depan dan posisi berdiri di atas hingga ibu jari muncul keluar dari lubang
3. Pegang bagian ujung sabuk
4. Pastikan sudut 15-20 derajat sambil melilitkan sabuk di pergelangan tangan

CARA PAKAI

JC-053 NEO SMART WRIST SUPPORT




KETERANGAN

1. Bentangkan dan masukkan alat melalui telapak tangan. Pastikan logo NEOMED menghadap ke depan dan posisi berdiri di atas hingga ibu jari muncul keluar dari lubang
2. Lilitkan sabuk yang kedua disekitar pergelangan tangan menyesuaikan dengan tekanan yang diinginkan
4. Alat telah terpasang dengan baik dan benar

CARA PAKAI

JC-7700 NEO KNEE HAPPINESS

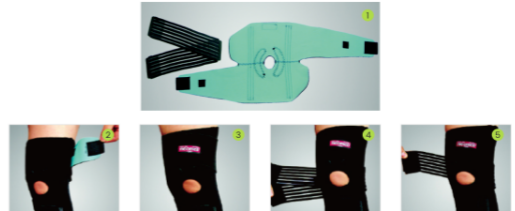

KETERANGAN

1. Bentangkan alat
2. Posisikan lubang di bawah bagian dalam alat ke bagian lutut dan (posisi lutut jangan di tekuk pada saat memasang alat) kemudian rekatkan sayap bagian atas berada di depan pada bagian atas
3. Pada gambar nomor 3 adalah alat telah terpasang dengan baik dan benar sebelum menggunakan sabuk
4. Rekatkan sabuk secara melingkar di area lutut
5. Sabuk dapat di rekatkan pada bagian sayap/bawah



Made in Korea

Galeri Medika

SINCE 1965
WORLD CLASS
No.1
neomed

INSTRUKSI MANUAL

www.galerimedika.com

CARA PERAWATAN

1. Cuci dengan cara manual (menggunakan tangan) dengan menggunakan air biasa, disertai dengan jenis sabun yang lembut secukupnya (jangan gunakan air panas)
2. Bilas hingga bersih kemudian jemur pada suhu ruangan
3. Jangan disikat pada saat cuci atau menggunakan mesin cuci karena akan merusak bentuk dan tekstur bahan
4. Jangan menggunakan pengering mesin cuci atau disetrika untuk mengeringkan alat setelah di cuci



PERHATIAN

1. Jangan menggunakan alat pada saat tidur (kecuali dalam kondisi tertentu dan atas saran profesional medis)
2. Jangan menggunakan alat jika masih dalam kondisi lembab atau basah